

# AEDの点検をしていますか？



緊急時に、AED(自動体外式除細動器)を正常にご使用いただくために、日頃からAEDの点検をお願いします。また、バッテリー等には使用期限や寿命があり、設置してから日時が経過している場合には、注意が必要です。

いざというときに、AEDをきちんと使用できるように、AEDの設置者は、特に以下の点に注意して、日常点検等を実施して下さい。

## 1. インジケータの確認

AEDには、AEDが正常かどうかを示すインジケータ\*が付いています。

点検担当者は、日常点検として、このインジケータの表示を日常的に確認・記録しましょう。

\* AEDの状態を確認するためのランプや画面

## 2. 電極パッドやバッテリーの交換

AEDの電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。

AEDを正常に作動させるために、これらの消耗品の交換時期を表示ラベル\*で把握し、適切に交換しましょう。

\* 各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。

※ 以上の日常点検や消耗品の交換などについてご不明な点は、お手持ちのAEDの購入店やメーカーにお問い合わせ下さい。

製造販売業者	大宇ジャパン株式会社	日本光電工業株式会社	日本メトロニック株式会社	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン	アドミス株式会社	オムロンヘルスケア株式会社
製品名	パラメディック (Paramedic) アイパッド (IPAD)	カルジオライフ (cardiolife)	ライフパック (LIFEPAK)	ハートスタート (HEARTSTART)	ZOLL AED Plus 半自動除細動器	パワーハートG3 HDF-3000
お問い合わせ先	0120-910-256 又は 03-3224-7143	AED保守受付 センター 0120-233-821	ライフパック お客様センター 0120-715-545	AEDコール センター 0120-802-337	AEDコール センター 0800-222-0889	AEDカスタマー サポート センター 0120-401-066
ホームページ (URL)	<a href="http://aed.dae.woo.co.jp/">http://aed.dae.woo.co.jp/</a>	<a href="http://www.aed-life.com/">http://www.aed-life.com/</a>	<a href="http://www.medtronic-lifepak.com/">http://www.medtronic-lifepak.com/</a>	<a href="http://www.philips.co.jp/">http://www.philips.co.jp/</a>	<a href="http://www.admiss.co.jp/">http://www.admiss.co.jp/</a>	(準備中)

## 《AEDの設置情報登録のお願い》

AEDの設置に関する情報は、AEDの設置場所の把握や、メーカーから設置者の皆様にお手持ちのAEDに関する重要な安全性情報を提供するために、とても重要です。

AEDを適切に管理するためにも、未登録のAEDをお持ちの場合、新規設置時及び設置場所の変更時等には、設置情報登録にご協力下さい。(登録した情報は、非公開とすることも可能です。)

※ 設置情報登録の方法は、お手持ちのAEDの購入店やメーカー(上記参照)にお問い合わせ下さい。

(参考)財団法人日本救急医療財団 AED設置場所検索 <http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm>



厚生労働省

ひと、くらし、みらいのために

(問い合わせ先)

厚生労働省医薬食品局安全対策課 電話: 03-5253-1111(代表)  
AEDの管理等についての詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

URL: <http://www.mhlw.go.jp/>